

# atraumatische Doppelklemme FS

- erhältlich in 2 Größen:  
15 cm - für Katzen und kleine Hunde  
17,5 cm - für große Hunde
- auch für Kastrationen bei Meerschweinchen und Kaninchen geeignet
- Qualitätsinstrument im Exklusiv-Vertrieb der Firma PRO ZOON Pharma



Ein Video in welchem der Einsatz der Doppelklemme dargestellt wird ist hier verfügbar:



Weitere Informationen zu dem innovativen neuen Instrument erhalten Sie bei  
PRO ZOON Pharma GmbH

“Patent Pending”

PRO ZOON Pharma GmbH  
Gesundheit für Tiere  
A-4600 Wels  
Tel. 07242 28 333 - Fax: 07242 28 333-4  
www.prozoon.at - bestellung@prozoon.at



ADOP1812V0

# Bei allen Kastrationen atraumatische Doppelklemme FS

ein innovatives Instrument  
spart Mühe & Zeit

bietet eine vereinfachte Vorgehensweise und „freie Sicht“  
bei allen KASTRATIONEN



Die neue & patentierte „atraumatische DOPPELKLEMME FS“ bietet Ihnen  
täglich folgende Vorteile bei allen Kastrationen:

- Durchführung von Kastrationen ohne Assistenz (auch bei Hündinnen)
- fixierte Vorverlagerung
- freie Sicht und geringe Kontaminationsgefahr
- sichere & einfachere Ligatur
- Sicherheit bei der Durchtrennung
- einfachere Nachblutungskontrolle




①



Durchtrennung des  
Eierstockbandes

②

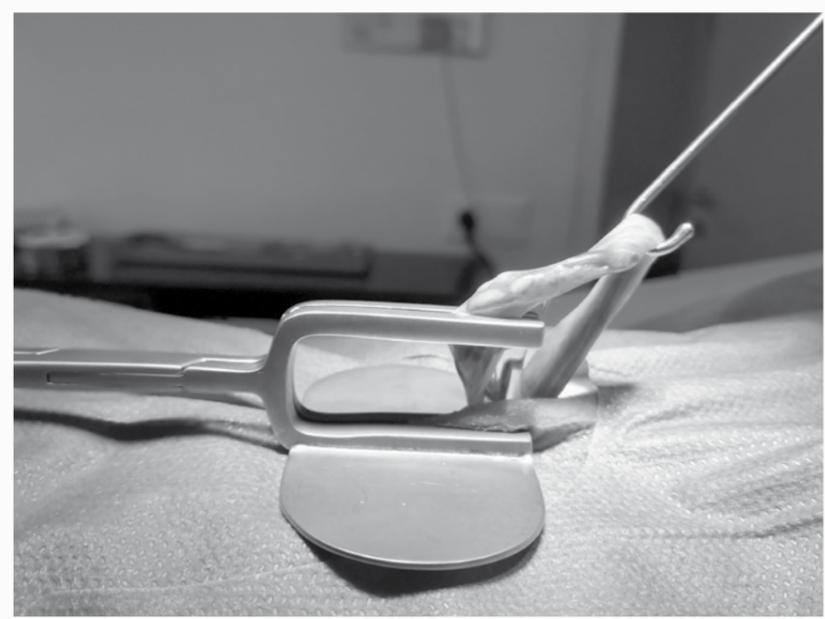


Vorverlagerung des Uterus und Ovars  
Anlegen der Doppelklemme FS

④



Mittiges spannungsfreies Abbinden des Eierstockbandes  
Ligatur der Gebärmutter

③

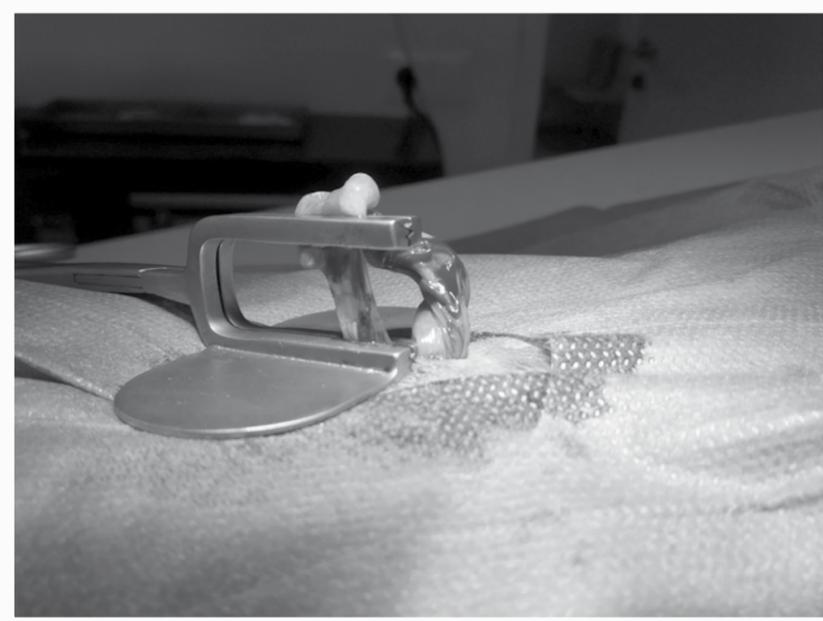

Atraumatische Fixation des *Ligamentum ovarii*  
Abstandhaltung von der Bauchdecke  
Klare Darstellung zur einfachen Ligatur

⑤



Durchtrennung des Gewebes  
Abnahme der Doppelklemme und Nachblutungskontrolle  
Entfernung des Ovars

